


ORALE AFNAME

Instructie voor orale afname.
Lees deze instructie goed!

1 Dit heb je nodig



Bekijk hier de
instructievideo

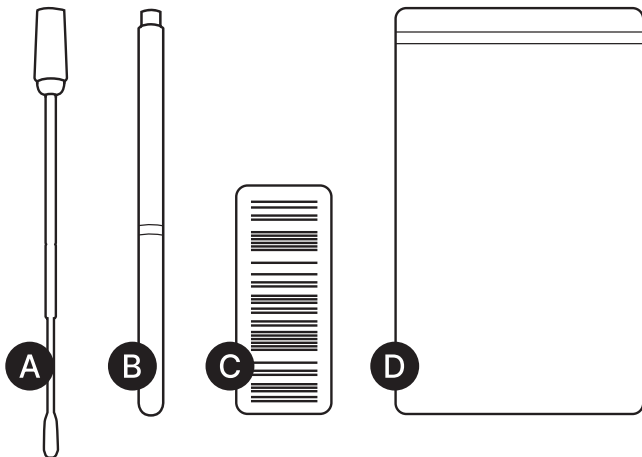


A. Wattenstaaf
B. Testbuis

C. Barcode sticker
D. Safety bag

ORALE AFNAME

Instructie voor orale afname.
Lees deze instructie goed!

2 Zo doe je de test

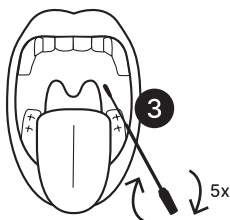

1. Pak de lange buis met rode dop. Besticker het met de **blauwe sticker** voor **orale afname**.
2. Draai de dop van de buis en neem de wattenstaaf (*die vastzit aan de dop*) tussen duim en wijsvinger.
3. Open de mond en draai het wattenstaafje vervolgens 5 maal langs de achterzijde van de mondholte, naast de huid.
4. Plaats de wattenstaaf terug in de buis en klik de dop vast.
5. Controleer nogmaals of de buis de juiste sticker bevat. Plaats daarna de buis in de bijgevoegde safety bag. Sluit deze nog niet indien je meerdere samples wil toevoegen.